

VENA CAVA Syndrome STENT
TRACHEOBRONCHIAL STENT

SPIRAL RELIEF STENT



COSMOTEC

SPIRAL RELIEF STENT

For Vena Cava Syndrome

悪性大静脈症候群の症状緩和を目的とした、大静脈留置用ステントです。

緩和療法に新たな血管内治療の手技として承認されました。

大静脈の血管に適したサイズのス TENT です。

For Tracheobronchial

Non-coverタイプの気管・気管支用ス TENT です。


大静脈／気管・気管支のどちらでも使用可能です。

Delivery


デリバリーシーースを使用し、目的部位まで到達させ、プッシャーを使用してス TENT を展開、留置する Self-Expandableス TENT です。

Adapter

デリバリーシーースの止血弁にローダーを挿入しやすいようにアダプターを準備しました。これによりス TENT がスムーズにシーース内に挿入することが可能です。

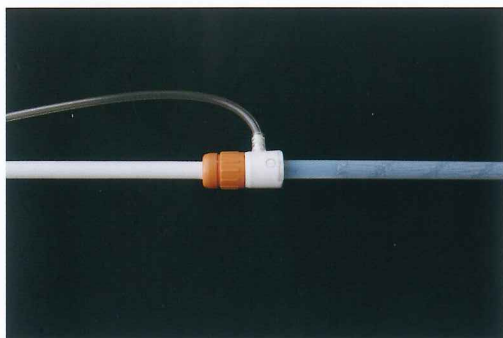


アダプターなし

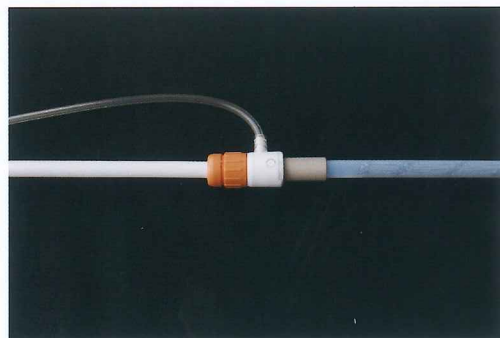


アダプターあり

Line Up

形状の違う2つのタイプを準備しました。

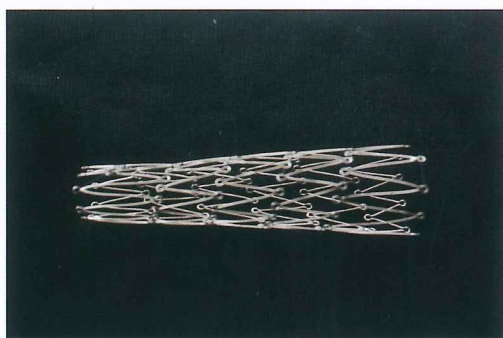

Taperd STENT
異なる径をカバーできる12/18mm径

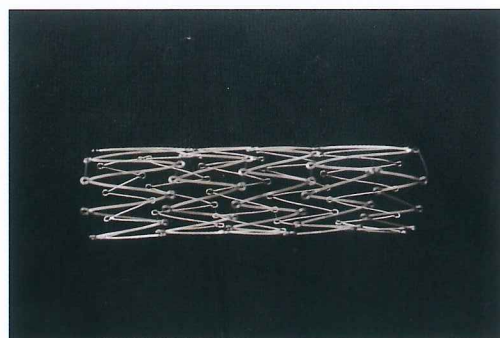

Straight STENT
長い病変をカバーできる60-80mm長

Technical Specification (Points)

ガイドワイヤーに沿ってアダプターを挿入しデリバリーシースの弁まで進める。続いてローダーにセットされたガイドチューブを、ガイドワイヤーに沿わせて進め、ガイドワイヤーがガイドチューブ内を完全に通過したら(図1)、ガイドチューブを抜去する(図2)。

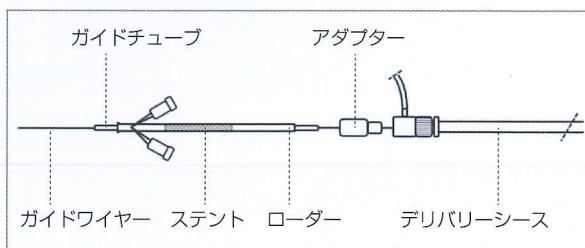


図1

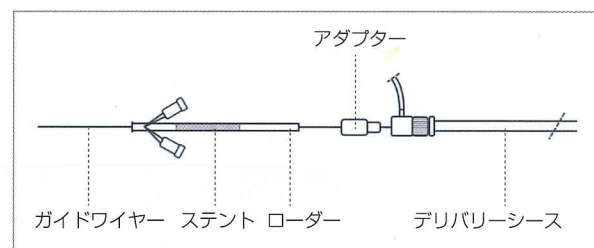


図2

プッシャーをガイドワイヤーに沿わせて進め、ローダー内のステントをデリバリーシース内にプッシャーを使用して押し進める。デリバリーシース内にステントが完全に挿入された後、アダプターをデリバリーシースの弁から外し、ローダーをアダプターから抜去する。抜去後、ローダーのつまみを左右に引き裂いて取り除く。アダプターはデリバリーシースの弁から外すが、抜去の必要はない(図3)。

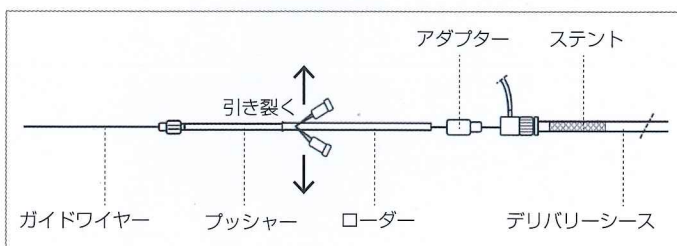


図3

デリバリーシースの先端が狭窄部を十分越えている状態でX線透視下で確認しながら、デリバリーシース内のステントの先端が狭窄部を十分越えるまで、ステントをプッシャーで押し進める。その際、デリバリーシースよりステントは出さない。

デリバリーシースの弁から外したアダプターをデリバリーシースの弁に再度挿入する。X線透視下で、プッシャーを固定したまま、デリバリーシースをゆっくりと手前に引き戻し、狭窄部位にステントを留置する(図4)。

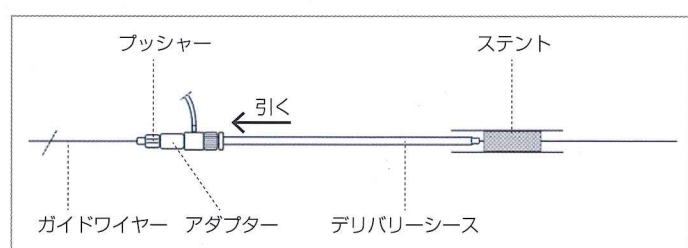


図4

SPIRAL RELIEF STENT

For Vena Cava Syndrome For Tracheobronchial

Size-Line Up


| Catalog Number | Stent Size | | Delivery Sheath | Type |
|----------------|---------------|-------------|---------------------|----------|
| | Diameter (mm) | Length (mm) | Inner Diameter (Fr) | |
| V-1660 | 16 | 60 | 14 | Straight |
| V-2060 | 20 | 60 | | |
| V-2080 | 20 | 80 | | |
| V-8280 | 18/12 | 80 | | Taperd |

*Taperd TypeはDistal側が12mm径、Proximal側が18mm径となります。

*本製品は全てEOG滅菌済です。

Product Structure

Stent Set

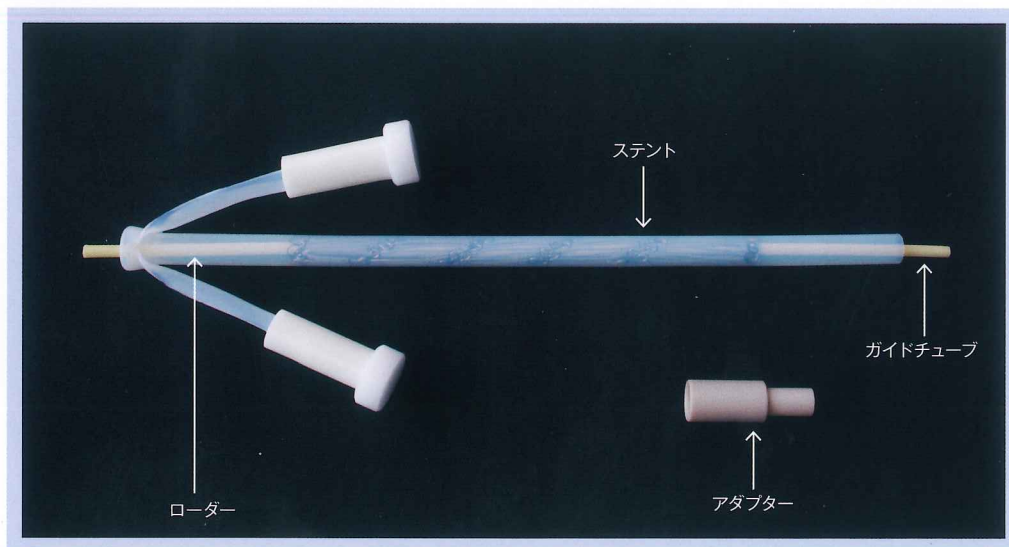

□販売名：コスモテックステント

□一般的名称：大静脈用ステント、気管用ステント、気管支用ステント

□医療機器承認番号：20900BZZ00656000

□クラス分類：高度管理医療機器（クラスⅣ）大静脈用ステント

高度管理医療機器（クラスⅢ）気管用ステント、気管支用ステント

製造販売元



COSMOTEC
コスモテック株式会社

本 社：〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-9 ツインビューお茶の水ビル
TEL.03-5802-3830 FAX.03-5802-6890 <http://cosmotec.com/>

営業所：札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・岡山・福岡

※お問い合わせは、担当営業、若しくは本社へご連絡下さい。

製造業者：ファーマックメディカル株式会社

販売代理店